

VOCO Profluorid® Varnish

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР

Показания

Лечение гиперчувствительных зубов

Запечатывание дентинных канальцев после препарирования полостей или при наличии чувствительных шеек зубов

Преимущества препарата

- Беспроблемное использование на влажных поверхностях
- Приятный вкус дыни
- Эстетичный, прозрачно-белый цвет зубов
- Удобные **УниДозы**, лак и аппликатор в гигиеничной одноразовой упаковке
- Быстрая десенсибилизация и выделение фтора (5% NaF ≈ 22. 600 ppm фтора)



Формы выпуска

REF 1268 50 УниДоз (0,25 мл), принадлежности
REF 1269 50 УниДоз (0,40 мл), принадлежности




Формы выпуска

REF 1267 туба 10 мл

VOCO GmbH
P.O. Box 767
27457 Cuxhaven
Германия
Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140
info@voco.com
www.voco.com

Представлено:

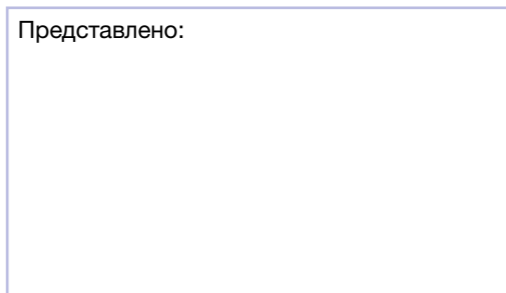

VOCO Profluorid® Varnish

ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ ЛАК ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

VOCO Profluorid® Varnish

ВЫРАЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Гиперчувствительность


Повышенная чувствительность зубов является широко распространенной проблемой среди населения. В основном, она вызывает у пациентов временные болевые ощущения, которые не всегда упоминаются на приеме у стоматолога. Причиной гиперчувствительности являются, как правило, открытые дентинные каналцы. Следовательно, цель лечения заключается в длительном их запечатывании.

Показания


VOCO Profluorid® Varnish – это фторсодержащий лак для лечения гиперчувствительности. При этом удается эффективно герметизировать дентинные каналцы, оголяющиеся после препарирования полостей или при чувствительных шейках зубов.

Состав и действие VOCO Profluorid® Varnish

VOCO Profluorid® Varnish – это лак на основе специальной смолы (колофоний) с содержанием фторида натрия 5% (соответствует 22.600 ppm фтора). Ионы фтора вместе с находящимися в каналцах ионами кальция способствуют осаждению фторида кальция, что ведет к надежному запечатыванию дентинных каналцев. Опрос врачей, использующих данный препарат, установил, что более 85% пациентов отметили абсолютное отсутствие болевых ощущений уже после

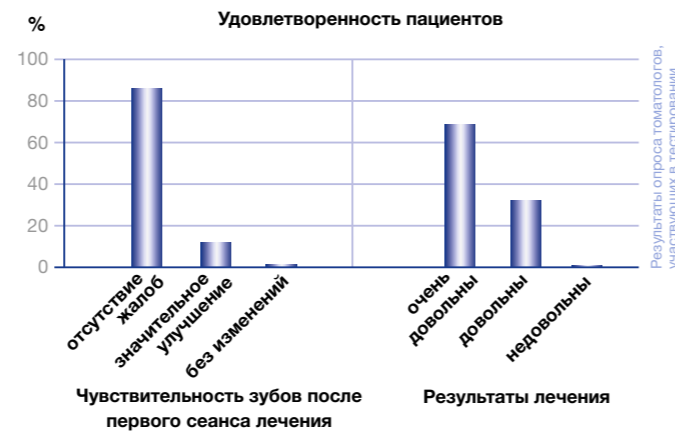

первого сеанса обработки VOCO Profluorid® Varnish. Наряду с быстрым запечатыванием дентинных каналцев VOCO Profluorid® Varnish образует на поверхности зуба депо фторида кальция, которое защищает зуб от кислотных атак, способствует реминерализации и длительно содействует образованию фторопатита. Кроме того, в лак добавлен ксилитол. Наряду с улучшением вкусовых характеристик ксилитол обладает доказанным кариостатическим действием.

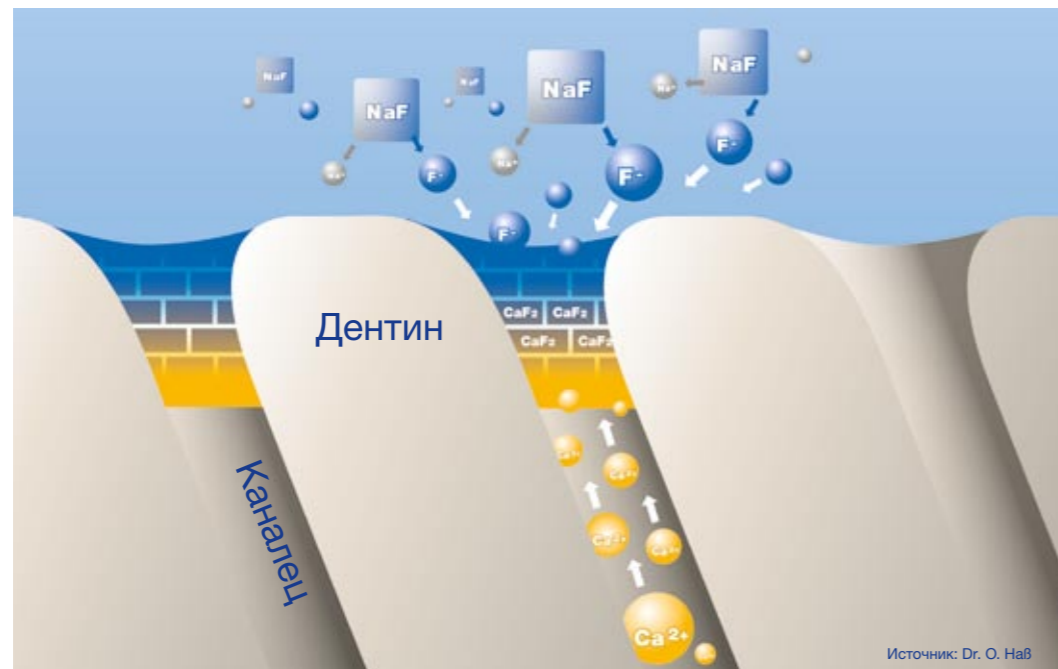

VOCO Profluorid® Varnish


ПРОСТО И ЭСТЕТИЧНО

Легкое использование

Колофониевая матрица у VOCO Profluorid® Varnish позволяет получить хорошее сцепление, в том числе на влажных поверхностях. Следовательно, предварительное высушивание обрабатываемых поверхностей не требуется, таким образом, использование данного препарата в значительной степени экономит время. Результат – значительное возрастание готовности пациентов к сотрудничеству (напр., дети).

Эстетика и вкусовые характеристики

VOCO Profluorid® Varnish – это лак, который имеет цвет зуба и не оказывает отрицательного влияния на эстетику. Наряду с ксилитолом в лак дополнительно введен ароматизатор с запахом дыни, что ведет к получению приятного вкуса и запаха. Благодаря этому значительно возрастает его популярность у детей.

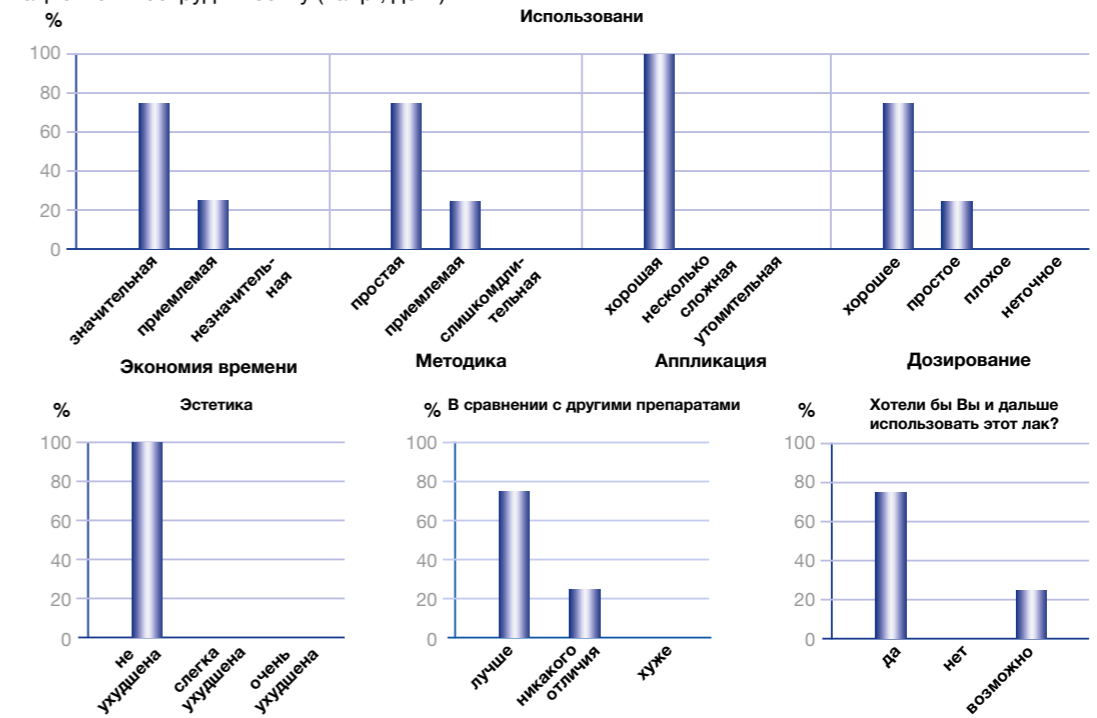

Мнение стоматологов

Стоматологи, использующие этот препарат, однозначно подтвердили хорошие рабочие и эстетические характеристики VOCO Profluorid® Varnish, причем большинство стоматологов отметили также его значительное преимущество в сравнении с препаратами-конкурентами. VOCO Profluorid® Varnish также получил хорошие отзывы среди пациентов. Практически все опрошенные пациенты после лечения отмечали отсутствие жалоб или указывали на значительное улучшение. VOCO Profluorid® Varnish – это намного больше, чем вопрос хорошего вкуса!

Преимущества УниДоз

Блистерная упаковка VOCO Profluorid® Varnish УниДоза содержит кисточку и лак, благодаря чему удалось получить гигиенически безукоризненный в использовании препарат. Аплицируемое количество VOCO Profluorid® Varnish в УниДозах уже предусмотрено в блистерной упаковке. Оно соответствует потребностям молочного/сменного прикуса (0,25 мл) или постоянного прикуса (0,40 мл). Таким образом, редуцируется риск передозировки.

Простая и эстетичная десенсибилизация с помощью VOCO Profluorid® Varnish:

